

規 格

フェイスルPEGキット(鮎田式胃壁固定具Ⅱ付)

医療機器承認番号 23100BZX00083000

品目コード	サイズ呼称	有効長	JANコード
800 001 5946	20Fr L-15	15mm	4542187216097
800 001 5947	20Fr L-20	20mm	4542187216103
800 001 5948	20Fr L-25	25mm	4542187216110
800 001 5949	20Fr L-30	30mm	4542187216127
800 001 5950	20Fr L-35	35mm	4542187216134
800 001 5951	20Fr L-40	40mm	4542187216141
800 001 5952	20Fr L-45	45mm	4542187216158
800 001 5953	20Fr L-50	50mm	4542187216165
800 001 5954	24Fr L-15	15mm	4542187216172
800 001 5955	24Fr L-20	20mm	4542187216189
800 001 5956	24Fr L-25	25mm	4542187216196
800 001 5957	24Fr L-30	30mm	4542187216202
800 001 5958	24Fr L-35	35mm	4542187216219
800 001 5959	24Fr L-40	40mm	4542187216226
800 001 5960	24Fr L-45	45mm	4542187216233
800 001 5961	24Fr L-50	50mm	4542187216240


1キット / 箱・滅菌済

付属品

名 称	仕 様	数 量
接続チューブ (持続投与タイプ)	有効長 300mm	1 本
接続チューブ (ボラス投与タイプ)	有効長 300mm	1 本
接続チューブ (ボラス投与タイプ) (ショート)	有効長 50mm	1 本
ガイドワイヤー	・ 外径 1.32mm (0.052") ・ 全長 600mm ・ 固定式ストレート (先端軟化型) ・ 100mm 間隔のデブスマーク	1 本
オブチュレーター	・ 本体 ・ 金属グリップ	1 本
スぺーサー	—	3 個
潤滑ゼリー	—	1 袋
胃壁固定具Ⅱ	・ 全長 230mm ・ 穿刺針有効長 81mm ・ ロッド ・ 穿刺針外径 20G (0.9mm) ・ 内径 (0.64mm)	1 個
ワンステップダイレーター	・ 外径 9.0mm (27Fr) ・ 有効長 143mm	1 個
処置キット (PEG造設用)	—	1 キット

単品販売

フェイスル オブチュレーター

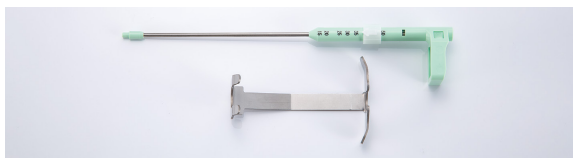

品目コード	JANコード
800 001 5673	4542187213355

医療機器届出番号 14B1X00007000024 1 本 / 箱・滅菌済


フェイスルボタン (接続チューブ)



接続チューブ名称	有効長	品目コード	JANコード
ボラス投与タイプ	300mm	800 001 6483	4542187221480
ボラス投与タイプ (ショート)	50mm	800 001 6484	4542187221497
持続投与タイプ	300mm	800 001 6485	4542187221503

医療機器承認番号 23000BZX00375000 1 本 / 箱・滅菌済

- ☐ 弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ☐ ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

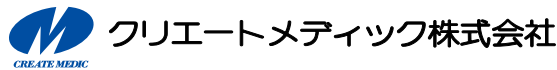

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>



フェイスルPEGキット

(鮎田式胃壁固定具Ⅱ付)

ISO 80369-3 対応

医療機器承認番号 23100BZX00083000



One-step dilation

ユースフレーター（ワンステップダイレーター）は、今まで煩雑だった針の穿刺からダイレーションまでのステップを簡略化しました。更にダイレーションの過程で穿刺針（16G）と細径ダイレーター（10Fr）をダイレーター（27Fr）内に収納することで胃後壁誤穿刺のリスクを低減します。

イントロデューサー変法PEGキット

ユースフレーター（ワンステップダイレーター）



ロッドを押すことで穿刺針及び細径ダイレーター（10Fr）を突出させ、穿刺を開始する。



内視鏡下で胃内に細径ダイレーター（10Fr）が確認されたら、「解除ボタン①」を押すことで穿刺針が細径ダイレーター内に収納される。



更に本体を胃内に押し進め、内視鏡下でダイレーター（27Fr）が確認されたら、「解除ボタン②」を押すことで細径ダイレーター（10Fr）がダイレーター内に収納される。

細径ダイレーター（10Fr）


穿刺針（16G）

ダイレーター（27Fr）

解除ボタン②

解除ボタン①

ロッド

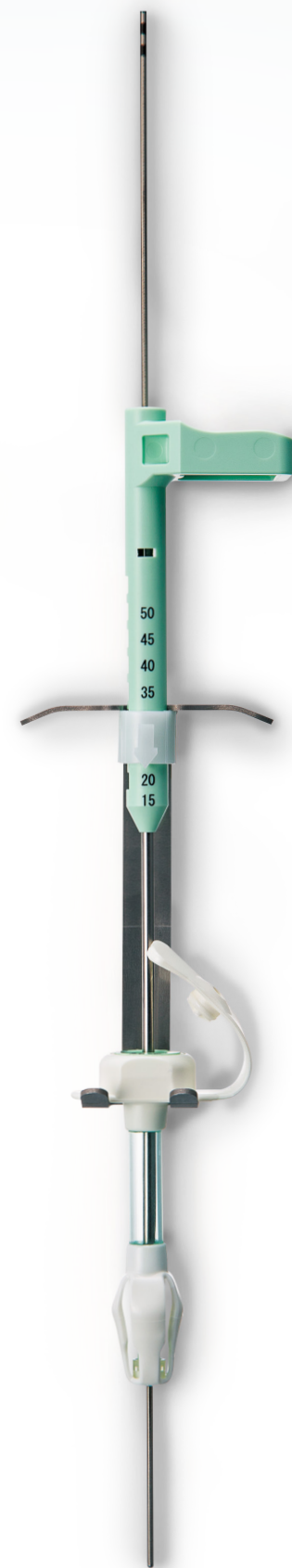

オブチュレーター

安定した挿入性を実現

- ◆ 付属のオブチュレーターとコシのある 0.052" ガイドワイヤーにより、直進性を高め安定した挿入性を実現しています。

ボタン・バンパー型カテーテル

- ◆ 保持力のあるウィング型胃内バンパーでしっかりと固定します
- ◆ 見やすいサイズ表示
- ◆ 有効長 1.5cm～5.0cmまでの豊富なサイズラインナップを取り揃えています。



接続チューブ（ISO 80369-3 対応）

- ◆ チューブ内腔を広くした設計になっており栄養剤等の流量を確保します。
- ◆ “ボラス投与タイプ（ショート）”は有効長が50mmと短いため半固形栄養剤の投与に適しています。



付 属 品

胃壁固定具Ⅱ



片手で操作可能な“胃壁固定具Ⅱ”が付属されています。

処置キット（PEG造設用）



胃瘻造設に必要な処置キットが付属されています。