




クリニーレッグバッグ NSタイプ

様々なライフスタイルに合わせて使用可能な
装着式集尿器です

豊富なラインナップ 3種類(750、500、350mL)のサイズから選択できます。

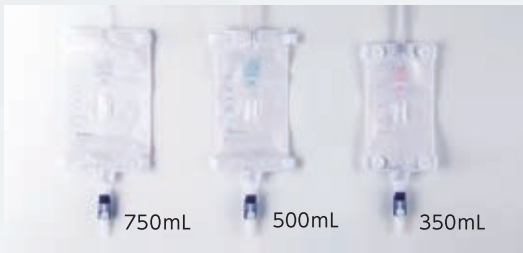

クリニーレッグバッグ NSタイプ

※NSタイプは「NON-STERILE」(未滅菌品)の略です。

規格	品番	内容	滅菌	JANコード
350mL	800 001 4806	レッグバッグ 5枚入/箱	未滅菌	4542187204780
500mL	800 001 4807	固定用ベルト 5セット入/箱 (幅13mm 長さ610mm)		4542187204797
750mL	800 001 4808	別添コネクター 5個入/箱		4542187204803

チューブ長の調整が可能



インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。



カットしたら別添コネクタをしっかりと奥まで差し込みます。

逆流防止弁

バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。

排尿口を収納可能



排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。

開閉しやすい排尿コック




排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。

固定用ベルト1セット付

各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。

ための「ボタン付固定用ベルト」(別売り)を使用すると、更に固定力が高まります。

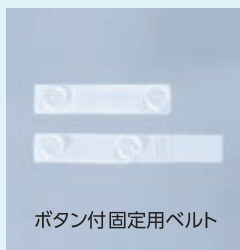

セット方法



予めレッグバッグに取り付けられている固定用ベルトを取り外して下さい。

レッグバッグの裏側からボタン付ベルトのボタンを通して装着して下さい。

ボタン付固定用ベルト(未滅菌)

※別売り

規格	品番	内容	JANコード
S (350mL用)	800 001 3685	1セット入/箱 (幅25mm 長さ585mm)	4542187193541
ML (500mL、 750mL用)	800 001 3686		4542187193558