

別添コネクター  
(キャップ付)

インレットチューブ

保護カバー

固定用ベルト

コックハンドル

排尿口 (ジョイントチューブ)

How to use CLINY LEGBAG

# クリニーレッグバッグ 使い方

STEP  
1

手を清潔にしてから、インレットチューブの長さを調整して下さい。



インレットチューブを適切な長さに垂直にカットして下さい。



別添コネクターのキャップを外しインレットチューブに奥まで差し込んで下さい。

**注 意**

- 一度インレットチューブに接続した別添コネクターは、取り外しできません。
- 差し込み後軽く引っ張り、外れないことを確認して下さい。

STEP  
2

レッグバッグを脚に装着して下さい。



固定用ベルトを脚に巻き付けます。



適度に引張り固定させます。  
(ザラザラした部分に、上から被せるように固定させます。)



余った部分はカットすると使い易くなります。


STEP  
3

排尿口 (ジョイントチューブ) を保護カバーに収納すれば、コンパクトに装着できます。



STEP  
4

インレットチューブに装着した別添コネクターを、カテーテルや各種装具に接続して下さい。

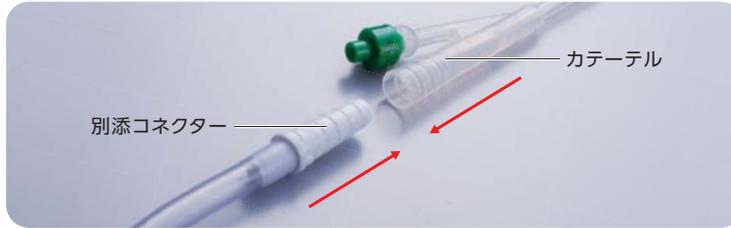


別添コネクターをカテーテル等の各種装具に接続して下さい。

**注意**

- カテーテルは奥までしっかり接続して下さい。
- 尿が出る場合は、カテーテルを折り曲げる等して、接続して下さい。

STEP  
5

排尿する場合は、排尿口(ジョイントチューブ)を保護カバーから取り外し、コックハンドル(青い部品)を下げます。

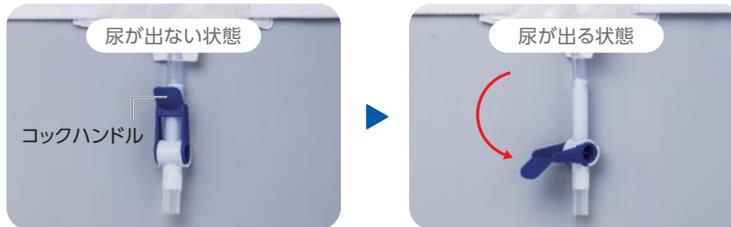

コックハンドルを下げると、尿が出ます。

STEP  
6

排尿が終わったらコックハンドル(青い部品)を閉め、保護カバーに収納して下さい。



排尿が終わったらコックハンドルを上に戻します。

ボタン付固定用ベルト(別売り)を使用する場合のレッグバッグへのセット方法



**セット方法**



予めレッグバッグに取り付けられている固定用ベルトを取り外して下さい。



レッグバッグの裏側からボタン付ベルトのボタンを通して装着して下さい。