


How to use

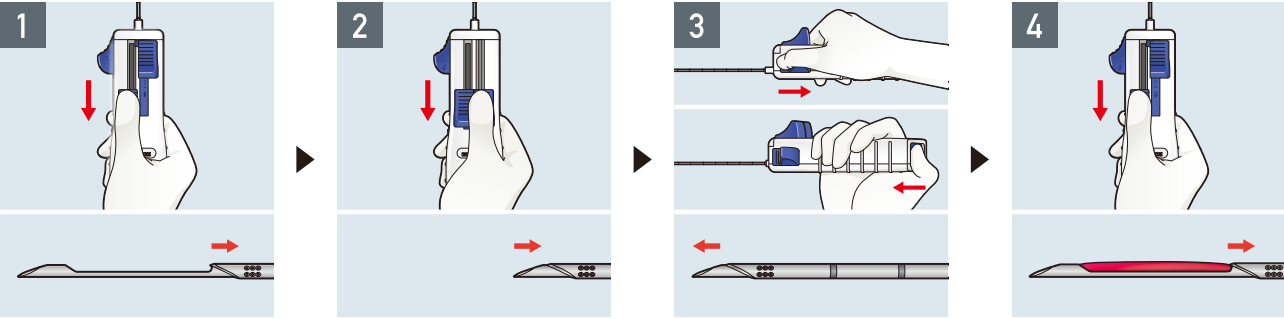

レバー1を引くと外針がセットされます。

レバー2を引いて内針をセットします。(スタンバイOK)

目的部位まで穿刺したら発射レバーを引き、(もしくは背面ボタンを押し)内外針を発射します。(組織を採取)

レバー1を引いて採取した組織を取り出します。

規格表

ストローク長	太さ	有効長	品目コード	JANコード
22mm	18G	150mm	800-002-1292	4900719504676
		200mm	800-002-1293	4900719504683
		250mm	800-002-1294	4900719504690

医療機器認証番号:307AFBZX00032000

包装:5本/箱・滅菌済



BEST100 II

フルオート生検針 ベスティオ II

〔販売元〕

 クリエイトメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

〔製造販売元〕


 ドクタージパン株式会社

穿刺性と操作性を追求した
メイドインジャパンの
ディスポーザブル生検針です。



Body

握りやすくコンパクトな設計により
安定した生検が可能

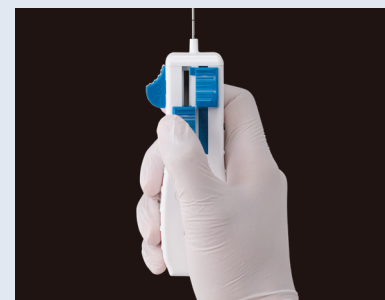


操作性を高めるレバー

指が掛けやすいレバー構造により、
スムーズな針セットが可能になりました。




2つの発射ボタン

針の発射は本体側面の発射レバーまたは下部背面ボタンで行えます。

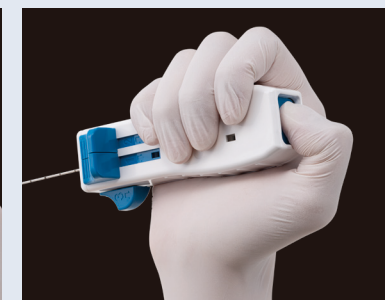


Needle

穿刺性、視認性、採取性に優れた
こだわりの生検針

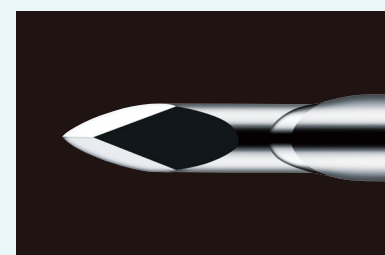


スムーズな穿刺

シャープなトリベベルポイント(先端を
三面にカット)により、スムーズな穿刺
を実現しました。

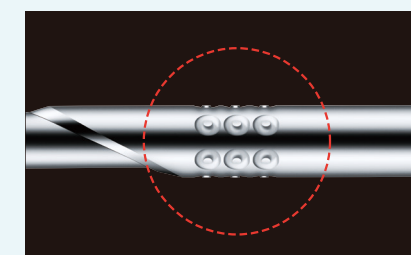

高い視認性

オリジナルのディンプル構造マーカ
ーにより、超音波下での視認性を高め
ました。

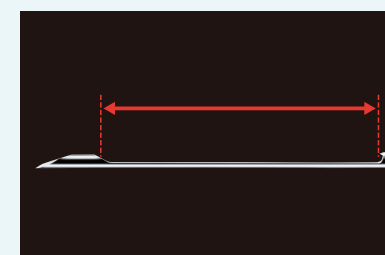

採取量の確保

針先端は短く、ノッチ(くぼみ)を拡大
することで、より大きな検体採取を可能
にしました。